

Distributeur automatique de médicament Carrousel (réf. 113120)



Le Carrousel est un distributeur automatique de médicament qui permet de programmer de 1 à 28 alarmes par jour.

Il est simple à utiliser qui sera d'une grande aide pour les personnes qui souhaitent conserver un maximum d'autonomie.

Grâce à un plateau de 28 cases, le Carrousel peut permettre une distribution de médicament allant jusqu'à 28 jours (en fonction du nombre de prises).

Principe de fonctionnement

A l'heure de la prise programmée, le carrousel effectue une rotation du plateau et les pilules insérées sont disponibles face à l'ouverture. Une alarme sonne et l'appareil émet un flash rouge intermittent. La personne penche alors le distributeur pour obtenir les pilules ce qui a pour effet de stopper l'alarme.

Programmation du Carrousel

1) Vous devez déterminer le nombre de prises par jour. Étant donné que le plateau contient 28 cases, vous pourrez choisir de 1 à 28 prises par jour.

Par exemple, si vous choisissez 4 prises par jour, le distributeur pourra distribuer des médicaments pendant $28/4 = 7$ jours.

2) Vous devez fixer les heures d'alarmes pour chaque prise quotidienne.

Par exemple, si vous avez choisi 4 prises par jour, vous devrez régler les 4 alarmes journalières.

Remplissage du distributeur

Le distributeur contient un panier de remplissage de 28 cases qui peut se retirer (les



plateaux supplémentaires sont proposés en option). Il y a un disque qui se pose sur plateau et qui sert d'indicateur pour les prises de médicament ce qui facilite le remplissage.

(l'appareil est fourni avec 3 disques, 2 disques marqués pour 1/2/3/4 prises par jour et 1 disque vierge pour effectuer une programmation spécifique).

Par exemple, pour 4 prises de médicament par jour, vous pouvez utiliser le disque noté 4x et remplir 28

cases correspondant à 7 jours de traitement.

Le remplissage est souvent effectué par une personne tierce (par exemple une infirmière ou un membre de la famille).

Sécurité



Par mesure de sécurité, le distributeur peut être verrouillé à l'aide d'une clé (fournie). Lorsque l'appareil est verrouillé, la personne peut retirer normalement ses pilules mais ne peut pas ouvrir l'appareil pour effectuer le remplissage.

Caractéristiques techniques

- Poids 480 g (avec piles)
- Dimensions : 190 mm (diamètre) x 60 mm (Épaisseur)
- Garantie 1 an